

Подобрена технология с
нова перспектива за
грижата за
инконтиненцията

Spirit™

HYDROCOLLOID ADHESIVE SHEATH

Ръководство за правилно използване на
самозалепващи се мъжки външни катетри

BAIRD | **CARE**
Care. Comfort. Choice.


well care

Следвайте тези За прилагане и махане за повече

Оразмеряване

Изберете подходящия размер като използвате приложеното ръководство. Поставете ръководството за оразмеряване по оста на пениса, за да намерите подходящият размер.

За комфорт и ефективност изберете размер най-близък до ширината на пениса Ви.

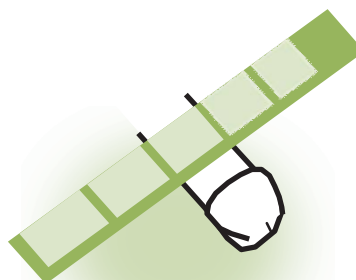

Вземете Вашите консумативи

Ще Ви трябва катетър, торбичка със свързваща тръба, ножица без заострени ръбове, сапун (не използвайте сапуни, които оставят крем или мазни остатъци върху кожата) гъба и хавлия.



Подстригване на окосмяването

Винаги измийте ръцете си преди това. Подстрижете окосмяването около вала и основата на Вашия penis, както и всички косми, които могат да попречат на лепилото върху катетъра.



Почистете пениса си

За да може лепилото на катетъра да прилепне правилно, кожата трябва да е чиста и много суха. Измийте пениса си с мек сапун (да не съдържа изкуствени аромати) и топла вода. Трябва да оставите зоната да изсъхне преди да продължите.



Приложение и позициониране

Поставете навития самозалепващ катетър на върха на пениса. Бавно и внимателно развийте катетъра, оставяйки достатъчно място в края му, така че върха на пениса Ви да не се трие от вътрешната част на катетъра. Ако е необязан, не забравяйте да оставите препуциума на място над главата на пениса.



Информацията, предоставена тук от Bard, не е предназначена да замести посещение, консултация или съвет от медицински специалист.

СТЪПКИ

безопасност, сигурност и комфорт.

Стиснете, за да приложите

Изгладете всички бръчки в катетъра. Леко стиснете катетъра, за да го прилепите правилно към кожата. Времето за носене може да бъде значително намалено, ако лепилото не е правилно залепено. Забележка: Твърде много бръчки в катетъра индикира, че сте избрали неподходящ размер.



Свържете с дренажна торба

Пристегнете дренажната торба към бедрото или прасеца, в зависимост от Вашите дейности и облекло. Свържете единия край на тръбата с катетъра и срежете тръбата до удобна дължина. Свържете отрязания край към торбата. Винаги изпразвайте торбата преди да стане прекалено пълна и да дръпне катетъра.



Време за носене

Времето за носене варира според всеки потребител. За правилна хигиена се препоръчва мъжкия външен катетър да се сменя на всеки 24 часа.



Премахване на връзките

Стиснете свързващата тръба преди да махнете торбата от крака. Освободете ластиците на краката и откачете тръбата от горната част на торбата.

Премахнете катетъра

Внимателно навийте външния катетър напред и премахнете от пениса. За да помогнете за разхлабване на лепилото преди отстраняването, поставете топъл мокър компрес (като мокра кърпа) около катетъра.



Spirit™ Предимство на урошията

TheSpirit™ урошият е първият и единствен самозалепващ се мъжки катетър, който комбинира отличните влагоустойчиви свойства на хидроколоидното лепило с изключителната дишаща сила на силикона. Този синтез дава на потребителите и полагащите грижи за тях по-голяма увереност, като спомага запазването на целостта на кожата, минимизира мацерацията и поддържането на адхезия.



Вид 1

- ▶ Дължина урошият: 3" Дължина лепило: 1.75"
- ▶ Мек, дишащ урошият.
- ▶ Дължина и разположение в съответствие с традиционните външни мъжки катетри.

Размер		30/кутия REF	100/кутияREF
Small	25 mm	35301	35101
Medium	29 mm	35302	35102
Intermediate	32 mm	35303	35103
Large	36 mm	35304	35104
X-Large	41 mm	35305	35105



Вид 2

- ▶ Дължина урошият: 1.5" Дължина лепило: 1.75" Максимална площ на лепило при по-малко обвивка.
- ▶ Предно поставяне на лепило, предназначено да сведе до минимум непредвидено отлепване.

Размер		30/кутия REF	100/кутияREF
Small	25 mm	37301	37101
Medium	29 mm	37302	37102
Intermediate	32 mm	37303	37103
Large	36 mm	37304	37104
X-Large	41 mm	37305	37105



Вид 3

- ▶ Дължина урошият: 3" Дължина лепило: 3"
- ▶ Допълнителна адхезивна област в сравнение с подобни самозалепващи се катетри.
- ▶ Предно поставяне на лепило предназначено да сведе до минимум непредвидено отлепване.

Размер		30/кутия REF	100/кутияREF
Small	25 mm	39301	39101
Medium	29 mm	39302	39102
Intermediate	32 mm	39303	39103
Large	36 mm	39304	39104
X-Large	41 mm	39305	39105

Обобщения на показанията и предупреждения: Мъжките външни катетри са предназначени за употреба и лечение при пациенти с мъжка уринарна инконтиненция. Повторната употреба на този вид катетри може да създаде риск от инфекция, повреда на катетъра, което може да доведе до нараняване, заболяване или смърт на пациента. Използването на един катетър за по-дълъг период от 24 часа може да увеличи риска от усложнения. Не използвайте върху раздразнена и наранена кожа. Моля прочетете показанията и предупрежденията на продукта за по-подробна информация за безопасност и инструкции за употреба.

BAIRD

CARE

Care. Comfort. Choice.